




### Configuración de la Consola Kelvi Pro<sup>e</sup>

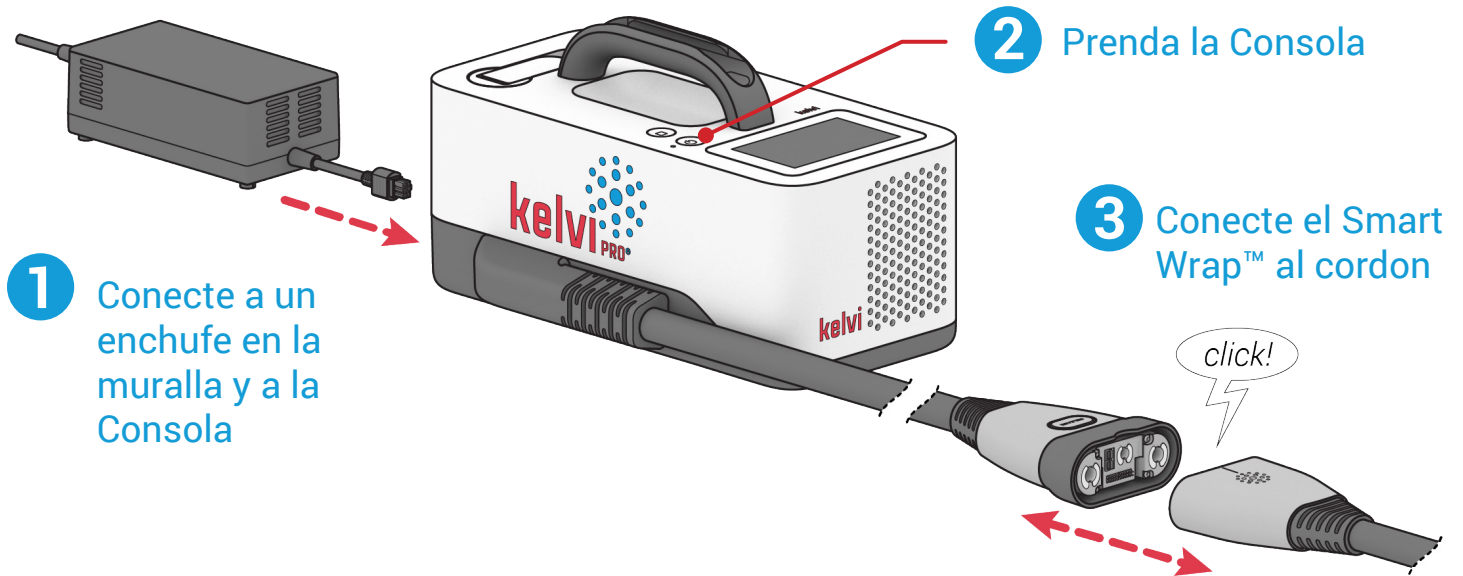


### Como Ponerse el Smart Wrap™

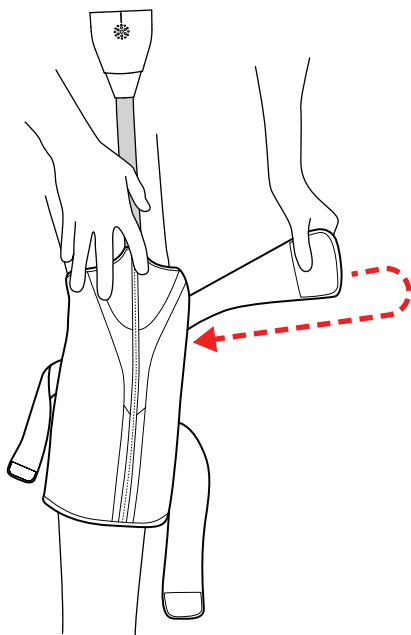

**4** Ponga el Smart Wrap™ sobre la rodilla, centrado sobre la rótula. Estire y asegure el tirante superior.

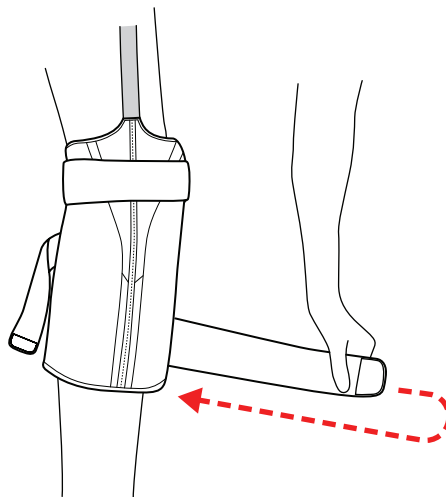


**5** Asegure el tirante inferior.

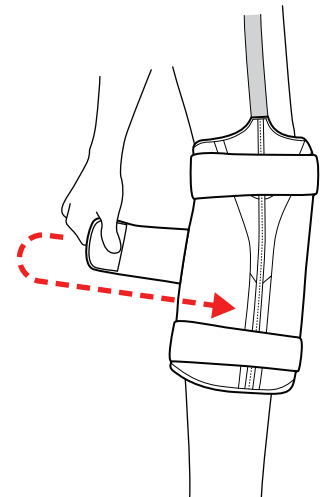

**6** Asegure el tirante intermedio. Ponga tensión en todos los tirantes prestando atención a sentirlos cómodos.


# Preparar un Tratamiento\*

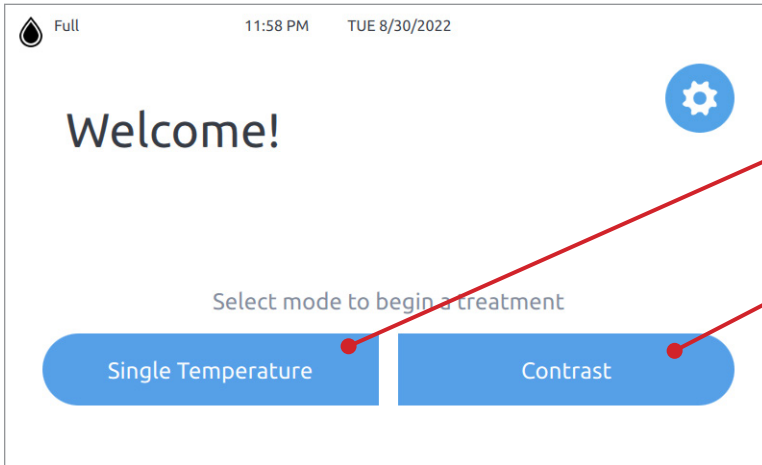

## 7 Seleccione el tipo de tratamiento

En la pantalla, seleccione **Single Temperature** para un tratamiento a temperatura constante.

Seleccione **Contrast** para un tratamiento alternando frío and calor.

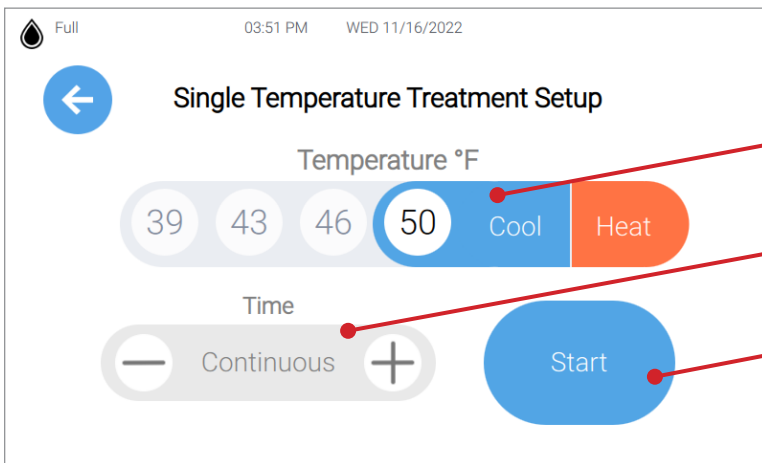


## 8 Seleccione temperatura y duración del tratamiento

Presione **Cool** o **Heat**, después seleccione temperatura y duración del tratamiento.

Ponga un límite de tiempo o elija **Continuous**.

Presione **Start** para iniciar el tratamiento.

Durante el tratamiento, el Smart Wrap™ puede ser ajustado de acuerdo con la necesidad y el confort.

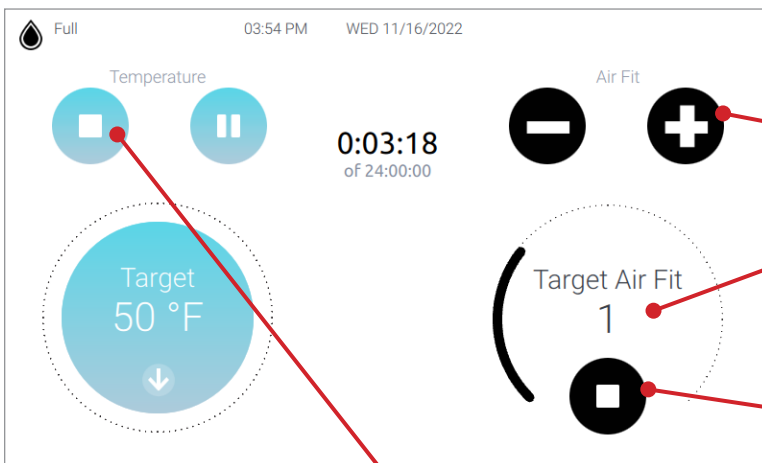

## 9 Cambie la presión de aire para ajustar el Smart Wrap™

Seleccione **+** o **-** para cambiar la presión de aire.

Parta en nivel 1 e incremente la presión en incrementos unitarios. No sobrepase la presión de aire más allá de donde se sienta cómodo.

Presione **Stop** para eliminar la presión de aire.

Presione **Stop** para terminar con el tratamiento.

\* Siga la prescripción del médico para el tratamiento



Escanee aquí para las instrucciones de uso completas



**IMPORTANTE:** Lea la instrucciones completas, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, precauciones, y advertencias antes de usar este producto. Para obtener ayuda sobre el uso del sistema Kelvi Pro™, comuníquese con su profesional médico o especialista licenciado en salud.

