

AIRCAST

AirSport+

EN-Ankle sprains, chronic ankle instabilities, inversion/eversion prevention, return to sports activities
FR-Instabilités chroniques, entorses de cheville, prévention des inversions/éversions, reprise d'activités sportives
ES-Torceduras de tobillo, inestabilidades crónicas, prevención inversión/eversión, retomar actividades deportivas
IT-Distorsione di caviglia, instabilità cronica, prevenzione dell'eversione/inversione, ritorno allo sport
DE-Sprunggelenksdistorsionen, chronische Bandinstabilitäten, Verhinderung der Inversion/Eversion, Rückkehr zu Sportaktivitäten
NL-Enkelverstuikingen, chronische enkelinstabiliteit, preventie van inversie/eversie, heremen van de sportactiviteiten

Semi-rigid shells and cross strap minimize ankle rotation

- Les coques semi-rigides et la sangle croisée évitent la rotation de la cheville
- Las valvas semirígidas y la cincha transversal minimizan la rotación del tobillo
- Valve semi-rigide e la fascia trasversale evitano la rotazione della caviglia
- Halstarre Schalen und seitliches Zugband minimieren die Sprunggelenksrotation
- Semi-rigide schalen and gekruiste banden die enkelrotatie minimaliseren

Foam-filled aircells support and protect the ankle

- Les cellules d'air et de mousse maintiennent et protègent la cheville
- Las celdas de aire y espuma sustentan el tobillo y lo protegen
- Le celle pneumatice in schiuma, sostengono e proteggono la caviglia
- Luftkammern aus Schaumstoff stützen und schützen das Sprunggelenk
- Steun door luchtcellen opgevuld met schuim en beschermt de enkel

BOA® Lacing System for customized fit

- Système à Laces BOA® pour un ajustement individualisé
- Sistema de lazada BOA® para un ajuste personalizado
- Sistema a lacci BOA® per regolazione individuale
- BOA®-Verschluss für individuelle Passformregulierung
- BOA® vetersysteem voor individuele aanpassing

Step-in design for ease of application

- Design par enfleurement pour faciliter la mise en place
- Diseño adaptado para facilitar la colocación
- Design per migliorare e facilitare l'applicazione
- Step-in-Design für eine einfache Anwendung
- Instapontwerp voor gemak van aandoen



DJO, LLC
1820 Division Street
Vista, CA 92081-8233
USA



MDS GmbH
Schriftgüter 44
30973 Hannover
Germany



AIRCAST

AirSport+

EN-Ankle Brace
FR-Attelle de Cheville
ES-Tobillera
IT-Cavigliera
DE-Sprunggelenkorthese
NL-Enkelbrace

UK	L	M	S	XS	EU	UK	USA MALE	USA FEMALE
> 9 1/2	42-46	37-42	34-37	30-34	< 2 1/2	< 2 1/2	< 3	< 5
> 10 1/2	8 - 1 1/2	4 1/2 - 8	2 1/2 - 4 1/2					
> 12	8 1/2 - 12	5 - 8 1/2	3 - 5					
> 13 1/2	10 - 13 1/2	6 1/2 - 10	5 - 6 1/2					

Available in left or right

- Disponible pour le côté droit ou gauche
- Disponible para izquierda o derecha
- Disponible per il lato destro o sinistro
- Rechts- oder linksseitig erhältlich
- Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

Contains one support

- Contient une attelle
- Contiene un soporte
- Contiene un tutore
- Enthält eine Orthese
- Bevat één brace

AIRCAST

AirSport+



AIRCAST

AirSport+

DJO POWERING MOTION

13-770 REV C 2020-02-06 © 2020 DJO, LLC

AIRCAST
Dimns. 108 X 65 X 235mm